

ワンキー・マウス操作ガイド

Rev.5.32

◎ 概要


ワンキー・マウスは操作のすべてを1つのスイッチで行うことができるマウスです。
Windows、MacOS、Android で使えます。

◎ 接続


- 「スイッチ」ジャックに操作用スイッチを接続します。
- コンピュータが起動した状態で USB ポートにワンキー・マウスを接続します。
- 数秒後に ワンキー・マウスのブザーが「ピッ」と鳴ればインストール完了です。

◎ カーソル操作

- スイッチを短く押すとマウスカーソルが動きだします。「・」
- スイッチを長く押すとカーソルは止まります。「—」

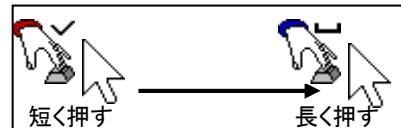


- カーソルが動いている時にスイッチを短く押すと、移動方向が直角に変わります。「・・」
- 移動方向はスイッチを押すごとに右一下ー左ー上ー右ーと変わってゆきます。「・　・　・」
- カーソルが希望の位置に来たらスイッチを長く押してカーソルを止めます。「—」

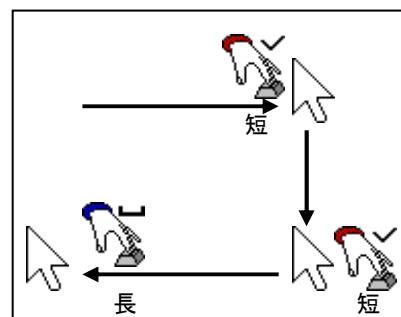

◎ クリック操作

- 左クリック操作はカーソル停止中スイッチを長く押します。「—」
- ダブルクリック操作はスイッチの長押しを2回続けます。「— —」
- 右クリック操作は長押しを3回続けます。「— — —」
- ドラッグ操作はスイッチ長押し後すぐ短く押します。「—・」
- ドラッグの終了(ドロップ)は。ドラッグ動作中スイッチを長く押してカーソル移動を止めると行われます。「—」

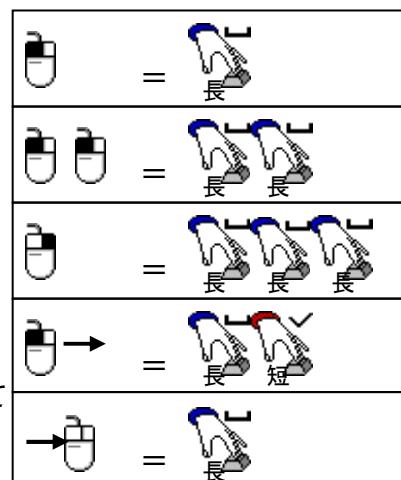

◎ その他

- スイッチを短長「・—」と続けて押すとカーソル移動スピードが通常／スロー交互に変わります。
- 付属ディスクのソフトでスピード、移動方向、操作方法などの設定を自分で変えることができます。
- 付属ディスク内の取扱説明書に設定変更の方法や便利な機能が載っています。

ワンキー・マウス特殊機能

1. スピード変更

- 設定ソフトを使用せずスイッチ操作でカーソルスピードを変えられます。
- スイッチを「—・—」(長短短)と続けて押すと、カーソル移動スピードが一段階速くなります。
- 同じ操作を行うごとにスピードが速くなっています。
- スイッチを「—・—」(長短長長)と続けて押すと、カーソル移動スピードが一段階遅くなります。
- 同じ操作を行うごとにスピードが遅くなっています。
- 一段階あたりのスピードの変化量が設定ソフトより小さいため、細かいスピード設定ができます。
- 設定したスピードは記憶され次回の起動時も変更後のスピードで動作します。
- 設定ソフトでカーソル移動スピードを変えると、上記変更は解除され、設定ソフトによるスピードで動作します。

2. スクロールホイール

- スイッチを「—・—」(長短長)と押すとマウスのスクロールホイールを手前に回す操作となり、画面が下へスクロールします。(文書が上に流れ下の方が見えるようになる)
- スイッチを「—・—・」(長短長短)と続けて押すと、マウスのスクロールホイールを奥に回す操作となり、画面が上へスクロールします。(文書が下に流れ上の方が見えるようになる)
- スクロール量は「コントロールパネル」(Windows)、「システム環境設定」(Mac OS)の「マウス」で調節できます。
- Windows では「—・—・—」(長4回)によるスクロールボタン操作でのスクロールも可能です。

3. Mac 用設定

- スイッチを「—・—・—・—・」(長7短1)と続けて押すと、Mac OS での使用に適した設定に変わります。
- Mac 用設定にすると以下の点が変わります。
 - ① 同じスピード設定にしたときカーソル移動スピードが速くなります。
 - ② スピード設定を変えたとき変化量が小さくなります。
 - ③ 通常スピードと低速移動スピードの比が小さくなります。
 - ④ スクロールホイール操作時のスクロール量が大きくなります。
 - ⑤ 設定ソフト操作時の動作が安定します。
- Mac 用設定にせず Mac OS で使用することも Mac 用設定で Windows を使用することも可能です。
- Mac 用設定はワンキー・マウス内に記憶され次回の起動時も同設定で動作します。
- Mac 用に設定された状態で「—・—・—・—・」とスイッチを押すと設定は解除されます。

◆ スイッチ操作一覧

・:スイッチを短く押す ー:スイッチを長く押す *:設定ソフトで変更可能 [A]:Android モード

スイッチ操作	カーソル停止時	カーソル移動中	備考
・	右*へ移動開始	右*へ曲がる	
ー	クリック	停止、ドロップ	
---	ダブルクリック*		[A]「ホーム」ボタン
----	右クリック*		[A]「戻る」ボタン
--・	ドラッグ 右*へ移動開始		クリック+右移動
--	低速で右*へ移動開始	速度切り換え	
..	下*へ移動開始	Uターン	右折2回
...	左*へ移動開始	左*へ曲がる	右折3回
....	上*へ移動開始		
----・	右ドラッグ* 右*へ移動開始		右クリック+右移動
-----	中(スクロール)ボタン*		[A]「メニュー」ボタン
---	上へスクロール		ホイール
---・	下へスクロール		ホイール
---・-	スピードアップ		
-----	スピードダウン		
-----	第2の設定へ切り換え		[A]画面消し
-----	設定ソフト操作		
-----・	Mac 用設定		

-----..	Android／PCモード切り換え		

ワンショット操作

スイッチ操作	カーソル停止時	カーソル移動中	備考
・	カーソル移動開始	移動方向切換	通常動作と同じ
..	左クリック	停止、 ドロップ(ドラッグ中)	長1回「ー」と同じ
...	右クリック	速度切換	速度切換は 移動中のみ可能
....	左ダブルクリック (短2回の2回繰り返し)	移動方向反転 (左→右、上→下)	
.....	ドラッグで移動開始	ドラッグ(移動中) ドロップ(ドラッグ中)	
ー	左クリック	カーソル停止	短2回「..」と同じ
-----	設定ソフト操作	なし	