

**新機能**

**速度切換 [低速移動]**

2006/05/14

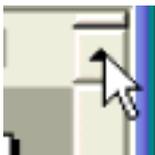
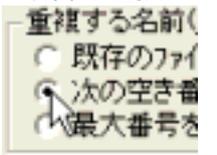
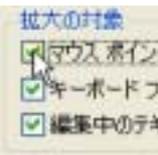
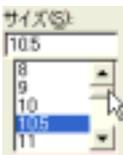
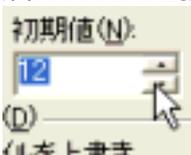
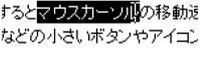
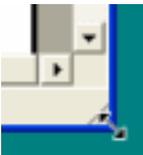
◆ 操作・動作

- スイッチを短長「・ - 」と続けて操作するとマウスカーソルの移動速度が変わります。
- カーソル停止時にこの操作を行うと、低速で移動を開始します。
- カーソルが通常で移動中にこの操作を行うと、低速になります。
- カーソルが低速移動中にこの操作を行うと、通常にもどります。
- ドラッグ操作中も移動速度を変えられます。
- カーソル移動中短押しで移動方向が変わり長押しで停止する動作は通常速度と同じです。

◆ 利点

- ツールバー、最大化、最小化ボタンなどの小さいボタンやアイコンを選択するとき、低速にすると選択しやすくなります。
- 細かい位置あわせがしやすくなります。
- ドラッグ操作で範囲の選択操作がしやすくなります。
- スクリーンキーボードをじゃまにならないよう小さくして置けます。

◆ 使用例

ボタン  「閉じる」	スクロール  スクロール	ツールバー  ツールバー	折り畳み  折り畳み	項目の選択  項目の選択	選択ボタン  選択ボタン
メニュー  項目選択	サイズ  項目リストから選択	項目リストから選択  項目リストから選択	ドラッグ  範囲選択	ドラッグ  スクロール	スクリーンキーボード  スクリーンキーボード
ドラッグ  サイズ / 位置	変形 / 移動  変形 / 移動	変形 / 移動  変形 / 移動	ATOK  ATOK	MSIME  MSIME	

◆ 注意点

- 低速でドラッグ操作を開始するときは、ドラッグ操作「 - ・ 」(長短)に続けて速度切換操作「・ - 」(短長)を行ってください。あわせて「・ - ・ - 」(長短短長)という操作になります。二つの操作順を逆にして「・ - - ・ 」(短長長短)と操作した場合はドラッグできません。
- 短長「・ - 」の連続操作で短と長のあいだに時間があくと、短と長が別々に認識され速度切換が行われず停止動作となります。連続操作しにくい場合は設定変更ソフトで「短押し後連続操作時間」を長く(数値を小さく)設定してください。ただし、この値を長くするほどスイッチ操作からカーソルが反応(移動 / 方向切換)するまでの遅れが大きくなります。